



Software didattico per migliorare
le competenze visive e viso-motoria

Tasti di scelta rapida e gesti touchscreen

Controllo del programma			
Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
↑ + I		Informazione	Lista degli tasti di scelta rapida e gesti
↑ + M		Menu	Al menu principale

Entro l'esercizio - Tutti i moduli			
Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
		SPAZIO	Iniziare il compito / Confermare il compito
enter		ENTER	Iniziare / Terminare l'esercizio
↑ + P		Preferences	Parametri dell'esercizio in corso
1		1	1o colore e motivo di sfondo <i>Gesto: Alternare tra i due colori di sfondo</i>
2		2	2o colore e motivo di sfondo <i>Gesto: Alternare tra i due colori di sfondo</i>
3		3	Cambiare esempio di sfondo <
4		4	Cambiare esempio di sfondo >
5		5	Ridurre la dimensione del motivo di sfondo
6		6	Aumentare la dimensione del motivo di sfondo
7		7	Ridurre la distanza del motivo di sfondo
8		8	Aumentare la distanza del motivo di sfondo
0		0	Nessun modello del fondo
N		Normale	Ripristinare le impostazioni di base del compito
↑ + ctrl + N		Normale	Ripristinare le impostazioni di base dell'esercizio

Entro l'esercizio - Tutti i moduli

Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
 + ctrl + 3			Muovere il fondo verso sinistra
 + ctrl + 4			Muovere il fondo verso destra
 + ctrl + 5			Muovere il fondo verso l'alto
 + ctrl + 6			Muovere il fondo verso il basso
 + ctrl + 8			Rallentare il movimento di fondo
 + ctrl + 9			Accelerare il movimento di fondo



Individuazione spot: oggetto fisso

Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
▼		KEY DOWN	Ridurre l'oggetto
▲		KEY UP	Ingrandire l'oggetto
◀		KEY LEFT	Ridurre l'opacità dell'oggetto
▶		KEY RIGHT	Aumentare l'opacità dell'oggetto
A		Animazione	Bloccare / Sbloccare l'animazione <i>Sfarfallio (opacità) -> Stop -> Su / Giù -> Stop</i>
⬆ + H		Suggerimento	Visualizzare l'oggetto cercato <i>Solo i compiti con anteprima</i>



Individuazione spot: oggetto in movimento

Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
▼		KEY DOWN	Rallentare il movimento
▲		KEY UP	Accelerare il movimento
⬆ + ctrl + ▼		KEY DOWN	Ridurre l'oggetto
⬆ + ctrl + ▲		KEY UP	Ingrandire l'oggetto
◀		KEY LEFT	Ridurre l'opacità dell'oggetto
▶		KEY RIGHT	Aumentare l'opacità dell'oggetto
A		Animazione	Bloccare / Sbloccare l'animazione <i>Sfarfallio (opacità) -> Stop -> Su / Giù -> Stop</i>
S		Start / Stop	Bloccare / Sbloccare il movimento
D		Direzione	Invertire la direzione del movimento
T		Tipo	Cambiare il tipo di movimento <i>stop + go -> yo-yo duro -> yo-yo molle -> continuo</i>
⬆ + H		Suggerimento	Visualizzare l'oggetto cercato <i>Solo i compiti con anteprima</i>



Individuazione spotPlus

Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
		KEY DOWN	Ridurre gli oggetti cercati
		KEY UP	Ingrandire gli oggetti cercati
		KEY LEFT	Ridurre l'opacità degli oggetti cercati
		KEY RIGHT	Aumentare l'opacità degli oggetti cercati
		Animazione	Bloccare / Sbloccare l'animazione <i>Sfarfallio (opacità) -> Stop -> Su / Giù -> Stop</i>
+ +		KEY DOWN	Ridurre tutti gli oggetti
+ +		KEY UP	Ingrandire tutti gli oggetti
+ +		KEY LEFT	Ridurre l'opacità di tutti gli oggetti
+ +		KEY RIGHT	Aumentare l'opacità di tutti gli oggetti
+ +		Animazione	Bloccare / Sbloccare l'animazione di tutti gli oggetti <i>Sfarfallio (opacità) -> Stop -> Su / Giù -> Stop</i>
+		Suggerimento	Visualizzare gli oggetti cercati <i>Solo i compiti con anteprima</i>



Individuazione zoom

Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
▼		KEY DOWN	Zoom lentamente
▲		KEY UP	Zoom rapidamente
▼		KEY DOWN	Ridurre l'oggetto alla fine dello zoom
▲		KEY UP	Ingrandire l'oggetto alla fine dello zoom
◀		KEY LEFT	Ridurre l'opacità dell'oggetto
▶		KEY RIGHT	Aumentare l'opacità dell'oggetto
A		Animazione	Bloccare / Sbloccare l'animazione <i>Sfarfallio (opacità) -> Stop -> Su / Giù -> Stop</i>
S		Start / Stop	Bloccare / Sbloccare il movimento
⬆ + H		Suggerimento	Visualizzare l'oggetto cercato <i>Solo i compiti con anteprima</i>



Individuazione track

Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
		KEY DOWN	Muovere il oggetto verso il basso
		KEY UP	Muovere il oggetto verso l'alto
		KEY LEFT	Muovere il oggetto verso sinistra
		KEY RIGHT	Muovere il oggetto verso destra
		Animazione	Bloccare / Sbloccare l'animazione dell'oggetto bersaglio
		Tipo	Cambiare il tipo di linea <i>punteggiata -> dashed 1 -> tratteggiata 2 -> tratteggiata 3 -> tratteggiata 4 -> tratteggiata 5 -> continua</i>
+ +		KEY DOWN	Diminuire lo spessore della linea
+ +		KEY UP	Aumentare lo spessore della linea
+ +		KEY LEFT	Ridurre l'opacità della linea
+ +		KEY RIGHT	Aumentare l'opacità della linea



Individuazione trace

Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
		KEY DOWN	Muovere il oggetto verso il basso
		KEY UP	Muovere il oggetto verso l'alto
		KEY LEFT	Muovere il oggetto verso sinistra
		KEY RIGHT	Muovere il oggetto verso destra
		Animazione	Bloccare / Sbloccare l'animazione dell'oggetto bersaglio



Individuazione stimula

Tasto	Gesto	Descrizione	Effetto
▼	↓	KEY DOWN	Rallentare il movimento
▲	↑	KEY UP	Accelerare il movimento
◀	←	KEY LEFT	Ridurre l'opacità degli oggetti
▶	→	KEY RIGHT	Aumentare l'opacità degli oggetti
E		Effetto	Effetto speciale
S		Start / Stop	Bloccare / Sbloccare il movimento
D		Direzione	Invertire la direzione del movimento
↑ + ctrl + ▼	↓	KEY DOWN	stimula 8000: Ridurre l'oggetto <i>Solo stimula 8000</i>
↑ + ctrl + ▲	↑	KEY UP	stimula 8000: Ingrandire l'oggetto <i>Solo stimula 8000</i>
↑ + ctrl + ◀	←	KEY LEFT	NOC: Meno righe (righe larghe) <i>Solo NOC</i>
↑ + ctrl + ▶	→	KEY RIGHT	NOC: Più righe (righe strette) <i>Solo NOC</i>

Copyright

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma e con alcun mezzo senza autorizzazione degli autori.